

MODE D'EMPLOI ARCOTRAY V2



Insertion de l'articulation sur la base



Base Arcotray-V2



Pour démouler la base Arcotray-V2, il suffit d'insérer la pointe du stop d'occlusion



Et de faire levier en poussant vers le bas



La base Arcotray-V2 se libère aisément de la cuvette de coulée



Une fois sortie de la cuvette de coulée, il suffit de quelques petits coups de marteau pour que le modèle se désolidarise de la base



Modèle libéré de la base Arcotray-V2



Modèle prêt à être tronçonné
Base Arcotray-V2 et base antagoniste