




Mise en œuvre de l'attachement glissière CPA

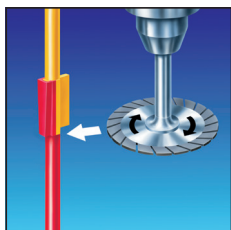


Séparer le paralléliseur de la partie mâle.

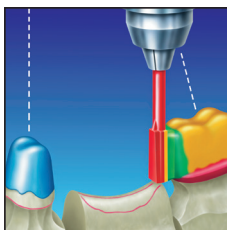


Fixer la partie mâle en utilisant la partie femelle comme paralléliseur dans l'axe d'insertion de la dent opposée.

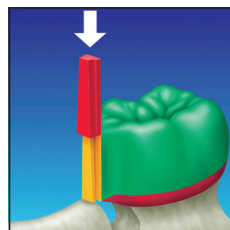


Faire coulisser la partie femelle sur la partie mâle.

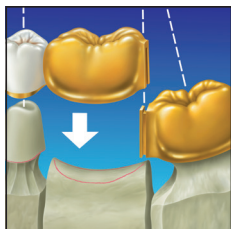

Lorsque le moulage secondaire est terminé et poli, il peut facilement être fixé à la construction primaire, même si les dies ne sont pas parallèles.

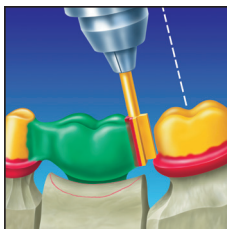

Fixer la partie femelle en utilisant la partie mâle comme paralléliseur dans l'axe d'insertion de la molaire.

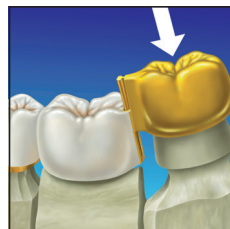

Lorsque le moulage secondaire est terminé et poli, il peut facilement être fixé à la construction primaire, même si les dies ne sont pas parallèles.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE, Classe II a. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou l'étiquetage remis. Non remboursé par les organismes d'assurance santé.

CE 0044

Fabriquant :

Servo-Dental GmbH & Co.

KG Rohrstraße 30

D-58093 Hagen-Halden

Fon: +49 (0) 23 31 / 95 91-0

Fax :+49 (0) 23 31 / 95 91-25

www.servo-dental.de - info@servo-dental.de